Confira algumas resoluções que regulamentam o exercício profissional!





## **Telefones**

## 0800-0717171

(71) 3341-8734 (Salvador) (79) 3224-4761 (Aracaju) (77) 3421-6520 (Vitória da Conquista)

## E-mails

Fiscalização (Bahia) defis@crefito7.org.br

# Fiscalização (Sergipe) defis-se@crefito7.org.br

### **Ouvidoria**

ouvidoria@crefito7.org.br

## Endereço

#### Sede - Salvador/BA

Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939, Sala 101. Caminho das Árvores - CEP: 41.820.021

#### Subsede - Aracaju/SE

Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12, Centro - CEP: 49.010-150

#### Subsede - Vitória da Conquista/BA

Praça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 2º piso, sala 41D - CEP: 45.000-525

WWW.CREFITO7.ORG.BR

## ➤ RESOLUÇÃO CREFITO-7 nº 010/2014

Dispõe sobre a regulamentação dos Consultórios de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no âmbito da jurisdição do CREFITO-7, e dá outras providências.

#### ➤ RESOLUÇÃO COFFITO n º 424/2013

Estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia.

#### ➤ RESOLUÇÃO COFFITO nº 414/2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte e dá outras providências.

#### ➤ RESOLUÇÃO CREFITO-7 nº 006/2013

Dispõe sobre a substituição das cédulas de identidade profissional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais com inscrição definitiva no âmbito da circunscrição do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região, e dá outras providências.

#### ➤ RESOLUÇÃO COFFITO nº 386/2011

Dispõe sobre a utilização do método Pilates pelo fisioterapeuta e dá outras providências.

Todas as resoluções estão disponíveis no site do CREFITO-7.

Acesse:www.crefito7.org.br



# **PILATES**



# HIGIENIZAÇÃO

**Ambiente:** importante a limpeza do ambiente, diariamente, inclusive embaixo dos equipamentos e dos tapetes.

**Equipamentos com madeira e alumínio:** utilize água e sabão neutro líquido na proporção de: uma parte de sabão neutro para quatro de água, com bucha macia. Seque com pano limpo após cada uso.

**Estofados:** utilize água e sabão neutro líquido na proporção de: uma parte de sabão neutro para quatro de água, com bucha macia. Seque com pano limpo.

Mãos: utilize o dispenser de álcool a gel.

**Roldanas:** aplique silicone *spray* seco e aguarde 10 minutos para secagem, retirando o excesso com pano limpo, pelo menos uma vez por semana. Antes da limpeza, é necessário que remova as cordas para não sujá-las com silicone.

É importante manter os cabelos sempre afastados dos trilhos.

**Trilhos e rodas:** aplique silicone *spray* seco, aguarde 10 minutos para secagem, retirando o excesso com pano limpo, pelo menos uma vez por semana.

**Tubos inox**: aplique silicone *spray* seco e aguarde 10 minutos para secagem . Retire o excesso com pano limpo, pelo menos uma vez por semana.

É importante deixar os estofados longe da luz solar porque podem causar rachaduras na superfície.

Não é aconselhável o uso de solventes, alvejantes, álcool, abrasivos, amoníacos, lustra-móveis, polidores e óleos, pois podem atacar a proteção do courvin provocando rachaduras e manchas.

A vida útil dos estofados pode aumentar se for feita a limpeza adequada.

## **→ MANUTENÇÃO**

Cadilac: a barra móvel deve ser usada com segurança sem risco de atingir outras pessoas. Nunca esquecer de fixar a alça de segurança à barra.

**Cordas**: devem ser substituídas quando estiverem achatadas e com a trama se desfazendo.

**Molas:** verifique-as semanal ou mensalmente, a depender da frequência de uso. Molas antigas ou desgastadas perdem sua resistência e podem quebrar durante a utilização. Se o gancho do *snap* estiver desgastado, interrompa o uso.

O corpo da mola não deverá ter fissuras ou torções porque aumenta o risco de quebra. Guarde-as sempre na posição horizontal para aumentar sua vida útil.

**Mosquetão:** observe sempre o fecho. Se notar sinal de desgaste, substitua-o imediatamente.

Parafusos e dobradiças: sempre verificar se estão ajustados. Quando precisar apertar os parafusos, ter cuidado para não apertá-los excessivamente.

**Reformer:** deve estar sempre com, pelo menos, duas molas, segurando o carro às barras de molas e na posição neutra.

Rolamentos do *Reformer*: vire o carrinho com as rodinhas para cima e aplique silicone *spray* seco diretamente nos rolamentos da rodinha (interno e externo), utilizando o tubinho que acompanha o *spray*.

Evite a lubrificação direta dos rolamentos porque pode remover a lubrificação interna dos mesmos.

**ORIENTAÇÃO:** evite a utilização de equipamentos sobre bases instáveis porque pode causar danos aos equipamentos.